



## **Veloped kävelykepin pidike: kokoamisohje**

Veloped-rollaattorin 2-osainen keppiteline, joka toimii myös turvahihnana, kun Veloped on kokoon taitettu kuljetusta tai säilytystä varten. Keppiteline sopii kaikkiin Veloped-malleihin.

Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi tai laitteellasi nähdäksesi video-ohjeet.

### **① Kiinnitä takapidike.**

Kiedo takapidike rungon pystysuoran takaputken yläosan ympärille heti korkeussäätö- ja pikavapautuskytkimen alapuolelle.

### **② Kiristä hihna vetämällä.**

Kiristä hihna tiukalle, kiedo se putken ympärille ja kiinnitä se tarranauhalla. Hihnan loppuosa saa roikkua vapaasti.

### **③ Säädä takasilmukka.**

Takasilmukan kokoa voi säätää tarranauhaa löysäämällä. Pyöreän muodon saavuttamiseksi saatat joutua puristamaan silmukkaa kevyesti.

#### ④ Kiinnitä etupidike.

Kiedo etupidike ylemmän runkoputken ympärille heti koripidikkeen taakse. Varmista, että hihnan luistonesto on käännetty runkoputkea kohti.

#### ⑤ Säädä etulenkki.

Etusilmukan kokoa voi säätää tarranauhaa löysäämällä. Pyöreän muodon saavuttamiseksi saatat joutua puristamaan silmukkaa kevyesti.

#### ⑥ Kiinnitä kävelykeppi.

Kiinnitä kävelykeppi työntämällä se ensin taka- ja sitten etusilmukan läpi.

#### ⑦ Kiinnitä kehys.

Kävelykepin pidikkeen hihnaa voi käyttää kokoon taitetun rungon turvahihnana Velopedin kuljetuksen ja säilytyksen aikana.