



Käyttöohje: Trionic-vaijerilukko



① Paikanna kiinnikkeen ruuvi.



② Irrota ruuvi 4 mm:n kuusiokoloavaimella.



③ Vedä hihnan pää irti kiinnikkeestä.



④ Kiedo hihna Velopedin takimmaisen pystysuoran runkoputken ympärille (Walkerissa puolipystysuoran runkoputken ympärille).



⑤ Työnnä hihnan pää kiinnikkeeseen.



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
⑥ Kiristä ruuvia/hihnaa 4 mm:n kuusiokoloavaimella, kunnes hihna on tiukka.



⑦ Leikkaa hihnan ylimääräinen pituus pois kaapelileikkurilla tai veitsellä.



⑧ Kuvassa näkyy telineen oikea kiinnitys.



⑨ Kiinnitä vaijerilukko kiinnikkeeseen ylhäältä päin ja paina vaijerilukkoa alaspäin, kunnes se napsahtaa kiinni kiinnikkeeseen.



⑩ Irrota kaapelilukko kiinnikkeestä painamalla kahta harmaata painiketta ja poistamalla lukko kiinnikkeestä.