



Kiitos, että valitsit 1600 lumenin Trionic LED -etuvalojen akkupakkauksella.

Tässä käyttöohjeessa näytetään sekä valopidikkeen ja valon kiinnittäminen Walker-laitteeseen (vasen sarake alla) että niiden kiinnittäminen Velopediin (oikea sarake alla).

Vasemmanpuoleisessa kuvassa **A** näyttää Walkerin pidikkeen kiinnitysosat (2 ruuvia + 2 aluslevyä), **B** näyttää Velopedin pidikkeen kiinnitysosat (1 ruuvi + 1 pyälletty mutteri + 1 mutteri).



Valonpidimen kiinnittäminen

Ohjeet kävelytuelle



A1. Paikanna mustan puolipystysuoran putken päältä kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät kahvaputken jarruvivun edessä.



A2. Löysää molemmat ruuvit LED-valon mukana toimitetulla 5 mm:n kuusiokoloavaimella.

A3. Irrota kaksi ruuvia kahvan kiinnikkeestä.

A4. Aseta valonpidin kiinnitysuristimeen siten, että sen pyöreä ja uritettu valonkiinnike osoittaa eteenpäin ja ylöspäin. Kiinnitä kaksi ruuvia aluslevyineen kiinnittimen reikiin.

A5. Kiristä kaksi ruuvia 5 mm:n kuusiokoloavaimella. HUOMAUTUS: On tärkeää kiristää ruuvit kunnolla, koska ne kiinnittävät kahvan putken kumikahvan ja jarruvivun kanssa.

Ohjeet Velopedin käyttöön



B1. Paikanna ruuvi Velopedin U-muotoisen kahvan keskimmäisestä taaittosarasta. Irrota ruuvi mukana toimitetulla 4 mm:n kuusiokoloavaimella.



B2. Vaihda vanha ruuvi LED-valon mukana tulevaan pidempään ruuviin. Kiinnitä pidempi ruuvi saranaan ja kiristä se 4 mm:n kuusiokoloavaimella.

B3. Kiinnitä valonpidimen lyhyt, kulmikas pää ruuvien alaosaan U-muotoisen tartuntatangon alapuolelle. Pidimen tulee osoittaa alaspäin. Kiinnitä pidike yhdellä aluslevyllä ja pyälletyllä mutterilla, jotka kiristät sormillasi.

B4. Jotta pidike kiinnittyisi paremmin ja estäisit pidikkeen tahattoman kääntymisen sivulle, vaihda uritettu mutteri mukana tulevaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun mutteriin ja kiristä se 10 mm:n kiintoavaimella.

B5. Tässä kuvassa lampun pidike näkyy oikein kiinnitettynä.

