



## Veloped-pullonpidike – Kokoamisohjeet


Veloped ja rollaattori Yleiskokoinen pulloteline, joka kiinnitetään Veloped-runkoon ruuvi kiinnikkeellä. Väri: musta.

Toimitus sisältää pullotelineen, kiinnityspuikon ja 3 mm:n kuusiokoloavaimen.

Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi tai laitteellasi nähdäksesi video-ohjeet.



① Irrota ja irrota yksi ruuvi puristimen kiinnikkeestä.

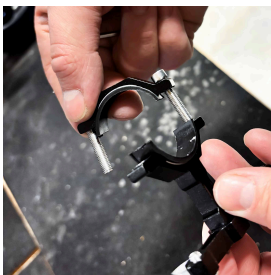

② Irrota toinen ruuvi niin pitkälle kuin mahdollista, mutta jätä se kiinni puristimeen.



③ Käännä puristimen toista puoliskoa 90 astetta, jotta puristimen asentaminen Veloped-runkoon on helpompaa. Kiinnitä puristin Velopedin oikean tai vasemman takarunkoputken pystysuoraan osaan pullonpitimen lyhyt varsi ylöspäin. Kun ruuvaat puristinta Velopedin runkoon, varmista, että molemmat ruuvit on kiristetty yhtä kireyteen.



④ Löysää puristimen kiinnikkeen kahta ruuvia ja ruuvaa sitten pullonpidike siihen kiinni, mieluiten siten, että pullonpitimen sivuaukko osoittaa ulospäin.



⑤ Veloped-pullonpidike on nyt asennettu oikein ja käyttövalmis. Hienoa työtä.