



Veloped-kuljetuslaukun käyttöopas

Veloped-kuljetuslaukku sisältää päälaukun Velopedin rungolle sekä kaksi pienempää laukkua etu- ja takarenkaille. Kuljetuslaukku sopii kaikille Veloped-malleille.

Kuljetuslaukku käy kaikkiin Velopedin malleihin.



① Avaa päälaukku.

Avaa säilytyslaukku (joka toimii myös etupyörien laukkuna) ja ota esiin isompi kuljetuslaukku ja takapyörien laukku.




② Pakkaa etupyörät.

Irrota etukiipeilypyörä Velopedin rungosta, pakkaa se isompaan pyörälaukkuun ja sulje vetoketju.




③ Pakkaa takapyörät.

Irrota molemmat takapyörät Velopedin rungosta, pakkaa ne pienempään pyörälaukkuun ja sulje vetoketju.

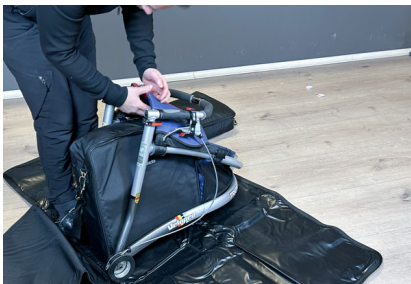

④ levitä pääpussia

Avaa päälaukun vetoketju sen koko pituudelta ja taita laukku auki lattialle. Aseta runko päälaukun keskiosaan ja aseta isompi etupyörälaukku Velopedin istuimen alle (takana olevan kahden pystysuoran runkoputken väliin).

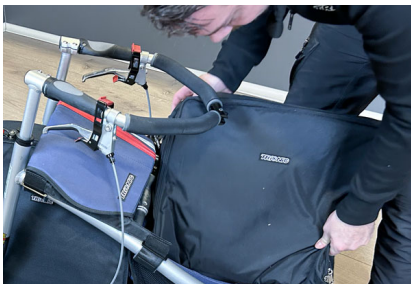

⑤ Lisää pyörälaukut.

Löysää korkeuden säätämisen pikavipuja ja nosta tartuntatankoa hieman, aseta pienempi takapyörälaukku Velopedin korin päälle ja laske sitten tartuntatanko ala-asentoonsa.

⑥ Sulje pussi.

Vedä päälaukun "läpät" Velopedin päälle ja sulje vetoketju.

⑦ Tässä kuvassa Veloped on pakattu oikein.

Pakkausohjeet

Skannaa
älypuhelimellasi tai laitteellasi
nähdäksesi video-ohjeet.

QR-koodi