



Kävelykepin pidike – kokoamisohjeet

Kaksiosainen kepinpidike, joka kiinnitetään Walkerin kahvaan ja runkoon. Yläosassa on älykäs pikalukitus toiminto, ja keppi voidaan kiinnittää ja irrottaa nopeasti. Sopii Walker 9er, 12er ja 14er -rollaattoreihin.

Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi tai laitteellasi nähdäksesi video-ohjeet.



- ① Käännä ylempi pidike niin, että logo osoittaa ylöspäin.



- ② Napsauta pidike kiinni kahvan putken yläosaan.

Napsauta pidike kahvan putken yläosaan ja ruuvaa se sitten paikalleen Phillips-ruuvimeisselillä.



- ③ Jos kiinnität sekä keppipidikkeen että selkänöjan

Huomautus: Säädä jarruvivun asentoa niin, että ylemmälle kepinpitimelle on tilaa selkänöjan vieressä. Kepinpidikettä voi olla tarpeen kallistaa ulospäin noin 30 astetta, jotta kepinpidike ja selkänöja sopivat Walkerin selkänöjaan.



④ Kiinnitä alempi pidike runkoon

Oikean-/vasemmanpuoleista kokoonpanoa varten käännä alempaa pidikettä niin, että yletät ruuviin rungon ulkopuolelta. Kiinnitä alempi pidike runkoon kiertämällä hihna runkoputken ympärille ja työntämällä se pidikkeen reikään.



⑤ Kiristä ruuvi/hihna

Kiristä ruuvi/hihna 4 mm:n kuusiokoloavaimella.



⑥ Leikkaa hihnan liiallinen pituus

Leikkaa hihnan ylimääräinen pituus kaapelileikkureilla.



⑦ Käyttövalmis