



## Käyttöohje: Pullopidikkeen kokoaminen Walker 12er -pyörään, koko S




① Pullonpitimen kokoamispaikka (O tai L).



② Kiedo hihna runkoputken ympärille ja vedä se pidikkeen läpi.



③ Vedä hihna tiukalle ja kiristä hihna kääntämällä mutteria myötäpäivään.

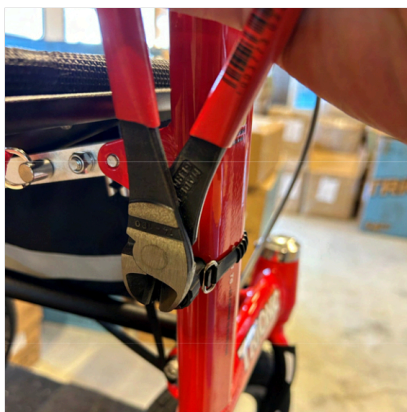


④ Leikkaa ylimääräinen hihna pois.



⑤ Kiinnitä toinen pidike samalla tavalla.



⑥ Kaksi pidikettä on koottu oikein runkoputkeen.

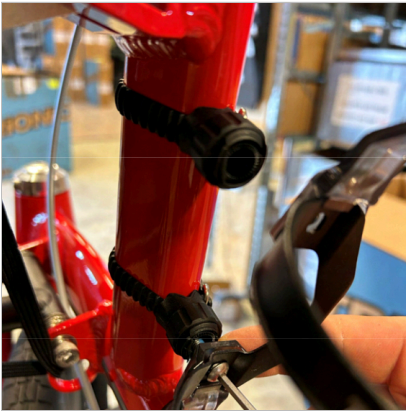

⑦ Kiinnitä pullonpidike kahdella ruuvilla. Pullonpidikkeen "aukon" tulee osoittaa ulospäin.



⑧ Pullonpidike on nyt kiinnitetty runkoon ja pullo asetetaan sisään sivulta ja poistetaan ulospäin.