



Trionic-rollaattorin selkänojan kokoamisohje

Vettä hylkivästä ja kestävästä 600D-polyesteristä valmistettu ergonominen, pehmustettu selkänoja sopii Walker 9er-, 12er- ja 14er -rollaattoreihin. Se on mukava ja tarjoaa varman tuen istuma-asennossa.

Selkänojan pituus ja syvyys ovat säädettävissä.

① Ruuvaa irti.

Poista kaikki ruuvit ja mutterit kahdesta puristimesta.

② Kiinnitä selkänoja.

Avaa puristimia hieman ja kiinnitä ne kahvaputkiin.

HUOM: Huolehdi, että "TRiONiC"-logo on oikeassa asennossa, sillä selkänoja on kulmassa.

③ aina ylöspäin.

Työnnä puristimet aivan päälle. Saatat joutua löysäämään jarruvivun ruuvia liikuttaaksesi sitä hieman taaksepäin.

④ kiinnitä selkänöja.

Kiristä puristimien ruuveja 4 mm kuusiokoloavaimella. Selkänöjan hihnat tulisi olla eteenpäin kiinnitettäessä.

⑤ Näet tästä kuvasta, miltä oikein koottu lopputulos näyttää.

Ennen rollaattorin avaamista.

Taitellaksesi rollaattorin kokoon, kallista selkänöjaa ylöspäin.

Tarvittaessa.

Jos selkänöja on liian matala tai korkea, voit säätää sen korkeutta. Poista kaksi ruuvia ja pultit. Kokoa sitten selkänöja uudestaan.