



Käyttöohje: Trionic Walkerin selkänojan hihnan vaihto




① Irrota hihnaa kiinnittävä ruuvi 3 mm:n kuusiokoloavaimella.

Toista vastakkaisella puolella.



② Varmista, että saat ruuvin, mutterin ja putkimaisen välikappaleen talteen.

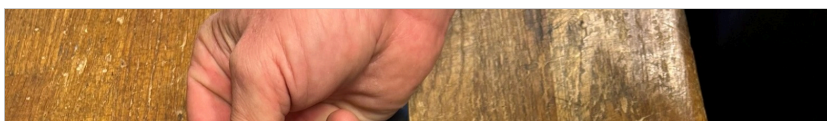



Käyttöohje: Trionic Walkerin selkänojan hihnan vaihto



- ⑤ Aseta uusi vaihtohihna pehmusteeseen.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että kohdistat hihnan pään TRIONIC-logoon kuvassa näkyvällä tavalla.



- ⑥ Aseta putkimainen välikappale hihnan päässä olevaan reikään.

